

Absorbest Super


Absorbest Super ist eine sterile superabsorbierende Wundauflage und zur Behandlung von exsudierenden Wunden vorgesehen. Die Wundauflage absorbiert Wundflüssigkeit und bindet sie im Verbandstoff.

Durch die nahtlosen Seiten kann Absorbest Super leicht auf der Wunde platziert werden. Das besondere Design lässt eine beidseitige Anwendung auf der Wunde zu. Durch diese Eigenschaft wird auch das Aufeinanderlagern mehrerer Auflagen ermöglicht, sollte zusätzliche Absorptionskapazität benötigt werden.


Die umgebende Haut wird vor Mazeration geschützt, während zugleich ein optimal-feuchtes Wundmilieu erzeugt wird. Das Wundexsudat wird effektiv aus der Wunde und in den DryMax-Kern fortgeleitet. Absorbest Super absorbiert sicher Wundsekret, welches Bakterien und andere schädliche Substanzen enthält.

Durch ihre ultradünne und weiche Beschaffenheit kann Absorbest Super auf allen Körperteilen und auch in Kombination mit einer Kompressionstherapie angewendet werden.


Anwendungsleitfaden

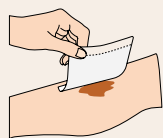

Die Wundauflage direkt auf der Wunde – eventuell zusammen mit einem weiteren geeigneten Verbandstoff – platzieren.

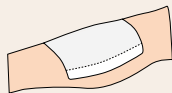

Die Wundauflage mit einer geeigneten Bandage, einem Tape oder einem Klebeverband fixieren.

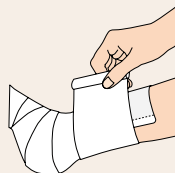

Absorbest Super kann in Kombination mit einer Kompressionstherapie angewendet werden.

Artikel	Maße	REF	Stk./Schachtel	Absorptionskapazität*	PZN
Absorbest Super	10x10 cm	F60713/10	10	130 ml	19206187
Absorbest Super	10x20 cm	F60715/10	10	330 ml	19206201
Absorbest Super	20x20 cm	F60716/10	10	600 ml	19206224

* Gemäß der internationalen Norm EN 13726

** Im Vergleich zu traditionellen Wundauflagen (G. Hoglin and H. Freijd, "A COHORT Study to investigate the benefit of the use of DryMax EXTRA superabsorbent Wound Dressing on a population of wet wounds," in Wounds UK Wound Care Conference, Harrogate, 2011)



- **Kosteneffizient**
- **Anwenderfreundlich**
- **Hoher Tragekomfort**
- **Verbessert Wundheilung****



DryMax® technology